

THIXOTROPIE


CLEARFIL™ DC CORE PLUS ist, aufgrund seiner einzigartigen Technologie zur Füllstoff-Oberflächenbehandlung, einfach und punktgenau zu applizieren.



STANDFESTIGKEIT

FARBEN

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & Quick KIT ist in Dentin und White verfügbar.

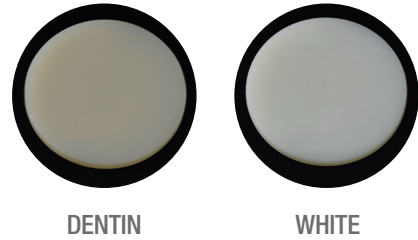

DENTIN

WHITE


EINFACHE UND STRESSFREIE ANWENDUNG



Kein Mischen, kein Schütteln der Flasche



Kein Einmassieren

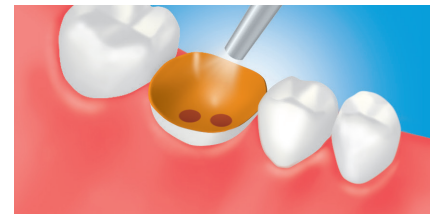

Kein mehrfaches Auftragen



Stift muss vorbehandelt werden. Nach dem Einbringen der Paste in den Wurzelkanal beträgt die Verarbeitungszeit der Paste 1 Minute.

⚠ Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

PRODUKTSORTIMENT

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & Quick Kit

#3580-EU DENTIN
#3581-EU WHITE
1 Spritze (9 ml),
CLEARFIL™ Universal Bond Quick: 1 Flasche (1 ml)
Zubehör: 20 Mixing Tips,
10 Front Tips (L), 10 Front Tips (S),
50 Applikationsspitzen (Endo),
1 Mischtablett,
1 Lichtschutzplatte



CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3571-EU
1 Flasche (5 ml),
K-ETCHANT Spritze (3 ml),
50 Einweg-Pinsel,
20 Applikationsspitzen,
Mischtablett, Lichtschutzplatte



CLEARFIL™ DC CORE PLUS

#2942-EU DENTIN
#2943-EU WHITE
1 Spritze (17,9 g / 9 ml) in der jeweiligen
Farbe, 20 Mixing Tips, 10 Front Tips (L),
10 Front Tips (S)

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3577-EU
Unit Dose Standard Pack
50 Unit Dose (0,1 ml / Unit Dose),
1 K-ETCHANT Spritze (3 ml),
20 Einweg-Pinsel,
50 Applikationsspitzen

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3574-EU
Value Pack
3 Flaschen (je 5 ml)

Applikationsspitzen

#3253-EU
20 Applikationsspritzen

K-ETCHANT Spritze

#3252-EU
2 K-ETCHANT Spritzen (je 3 ml)
40 Applikationsspritzen

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & QUICK KIT

PERFEKTE TEAMARBEIT FÜR EINEN ZUVERLÄSSIGEN AUFBAU.

STRESSFREIER UND EINFACHER
STUMPF-AUFBAU – FÜR HOHE
KLINISCHE ANFORDERUNGEN UND
ZUVERLÄSSIGE VERSORGUNGEN.



Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben können von denen des tatsächlichen Produkts abweichen. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie die mit dem Produkt gelieferte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Technische Daten und Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

“PANAVIA” und “CLEARFIL” sind eingetragene Warenzeichen von Kuraray Co., Ltd.
“KATANA” ist ein eingetragenes Warenzeichen von NORITAKE CO., LIMITED.

Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Website www.kuraraynoritake.eu

EC REP

Kuraray Europe, GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4
65795 Hattersheim am Main, Germany

CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK


CLEARFIL™ Universal Bond Quick von Kuraray Noritake Dental ist ein universelles Bonding, das sofort in die Zahnoberfläche eindringt. Einfach auftragen, trocknen und lichterhärten – fertig. In einem durch! Keine Wartezeit, kein Auftragen mehrerer Schichten, kein intensives Einreiben. Dank der einzigartigen Rapid Bond Technologie von Kuraray Noritake Dental stellt CLEARFIL™ Universal Bond Quick so mit einem einfachen Verfahren eine lange Haftung sicher.

EIN WIRKLICH UNIVERSALES BONDING

Direkte Komposit- und Kompomer-Restaurationen sind mit CLEARFIL™ Universal Bond Quick denkbar einfach. Komfortable Anwendung nach dem Verfahren Ihrer Wahl: Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch, ganz wie Sie möchten. CLEARFIL™ Universal Bond Quick liefert in jedem Fall optimale Ergebnisse, ganz ohne Wartezeit. Einfach applizieren und weiter.



Massierend applizieren

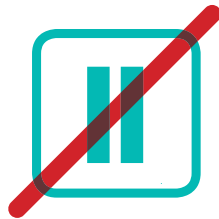

Trocknen



Lichterhärten

DAS PERFEKTE TEAM FÜR DIE STIFTZEMENTIERUNG UND DEN STUMPFBAUFBAU

CLEARFIL™ Universal Bond Quick ist aufgrund seiner hervorragenden Haftungseigenschaften die perfekte Ergänzung zu CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Der spezielle Beschleuniger für die Selbsthärtung ist ideal für die Bereiche, die durch Licht nicht erreicht werden können. CLEARFIL™ Universal Bond Quick haftet am Dentin im Wurzelkanal und zum Stift. Ein separater Primer ist nicht erforderlich.

CLEARFIL™ DC CORE PLUS


CLEARFIL™ DC CORE PLUS ist ein dualhärtendes (selbst- und/oder lichterhärtendes) Stumpfaufbaumaterial. Die selbsthärtende Eigenschaft bietet die ideale Lösung für schwer zugängliche Regionen im Wurzelkanal, welche nur bedingt mit Licht gehärtet werden können. Durch seine vereinfachte Anwendung und optimale Viskosität ist es bestens für stressfreie Restaurationen geeignet. Bei Stumpfaufbau Restaurationen ist es wichtig, das Risiko einer Kontamination durch eine kurze und einfache Anwendung zu reduzieren. Dank der optimalen Verarbeitungszeit von 3 Minuten können alle Schritte – vom Einbringen in den Wurzelkanal bis zum Stumpfaufbau – praktischerweise mit nur einer Mischkanüle durchgeführt werden.

VORTEILE

- ✓ Einfache und stressfreie Anwendung
- ✓ Dualhärtend
- ✓ 3 Minuten Verarbeitungszeit

MATERIALEIGENSCHAFT

Das Dentin-ähnliche Elastizitätsmodul von CLEARFIL™ DC CORE PLUS vermeidet erhöhten okklusalen Stress am Wurzelende. Somit wird die okklusale Belastung über die gesamte Oberfläche des Wurzelkanals verteilt. Dank der hohen mechanischen Eigenschaften von CLEARFIL™ DC CORE PLUS wird darüber hinaus trotz des Kaustresses eine stabile Restauration gewährleistet. Somit wird sichergestellt, dass das Risiko eines Materialbruchs in der Wurzel oder am Stumpf minimiert wird.

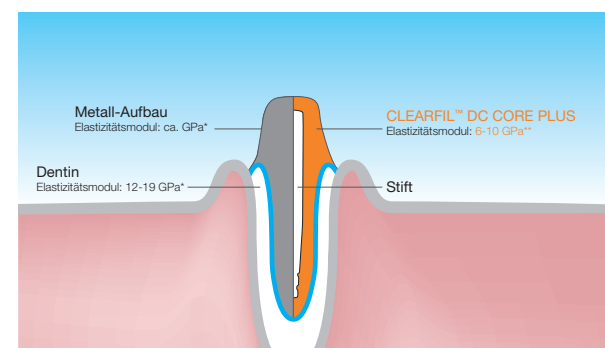


* Quelle: S. Takahashi, T. Hirasawa, et. al, J. J. Dent Material Vol. 16(6), 555-562, 1996.

** Quelle: Kuraray Noritake Dental


BIEGEFESTIGKEIT

CLEARFIL™ DC CORE PLUS zeigt eine hervorragende Biegefestigkeit im Vergleich zu anderen Stumpfaufbau-Systemen.

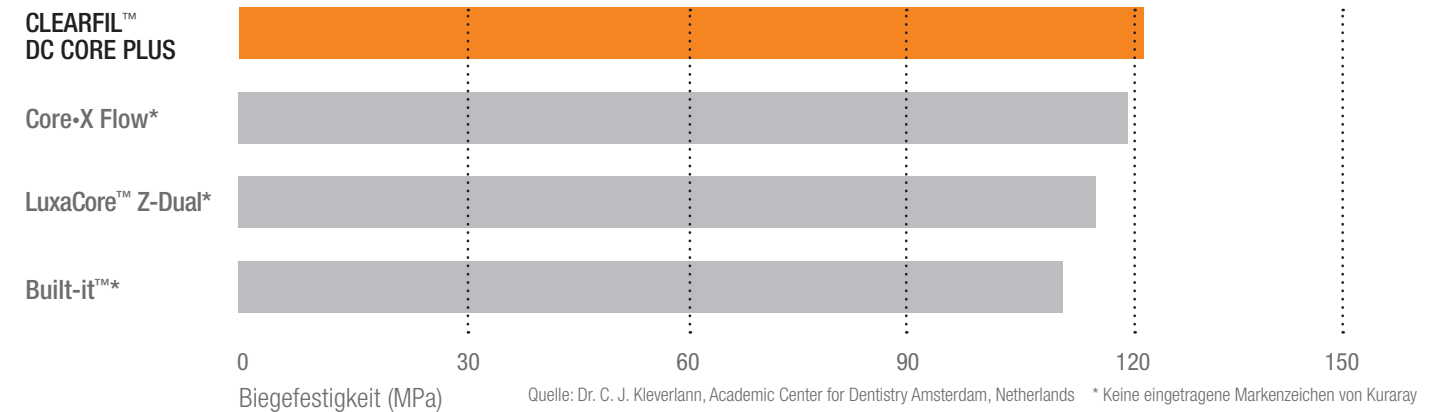

DUALHÄRTUNG

Der im CLEARFIL™ DC CORE PLUS enthaltene spezielle Beschleuniger ermöglicht in Kombination mit CLEARFIL™ Universal Bond Quick exzellente klinische Langzeitergebnisse, besonders in den Bereichen, die schwer oder gar nicht mit Licht zugänglich sind. Der im CLEARFIL™ DC Core Plus enthaltene Aktivator wandelt so die lichterhärtenden Eigenschaften in chemisch härtende Eigenschaften um. CLEARFIL™ Universal Bond Quick erzielt einen dauerhaften Haftverbund. Das MDP-Monomer baut eine starke chemische Haftung am Hydroxylapatit auf.

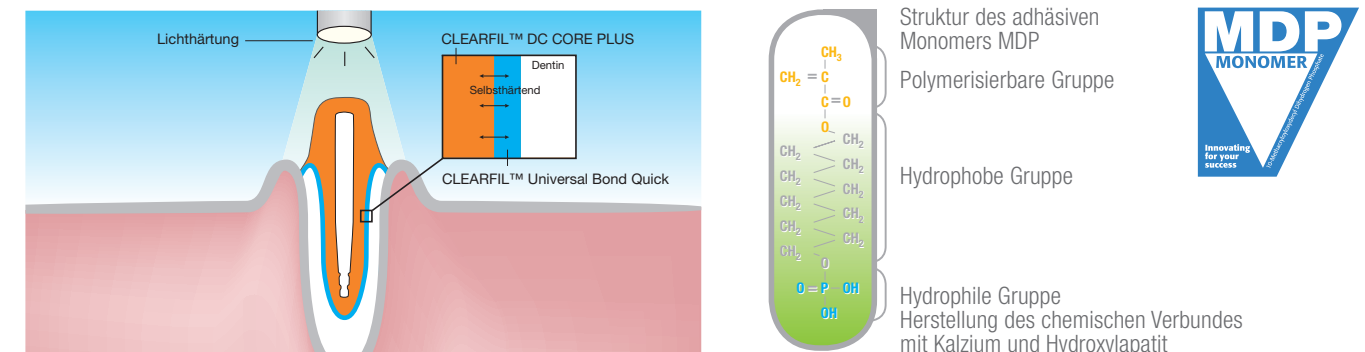

HERAUSRAGENDE HAFTWERTE BESTÄTIGT!

Haftwert des Stumpfaufbaumaterials zu Dentin

